



**purelens**


# Softcare N-Zym

Enzym-Reinigungstabletten für  
eine intensive, wöchentliche Reini-  
gung aller weichen und harten  
Kontaktlinsen

10 Brausetabletten zur Erhöhung des Tragekomforts  
und Sichern der Lebensdauer von Kontaktlinsen

Vergleichbar und anwendbar wie:

Ultrazyme, Unizyme, EYEEYE Nzym, Dynaeasy 10

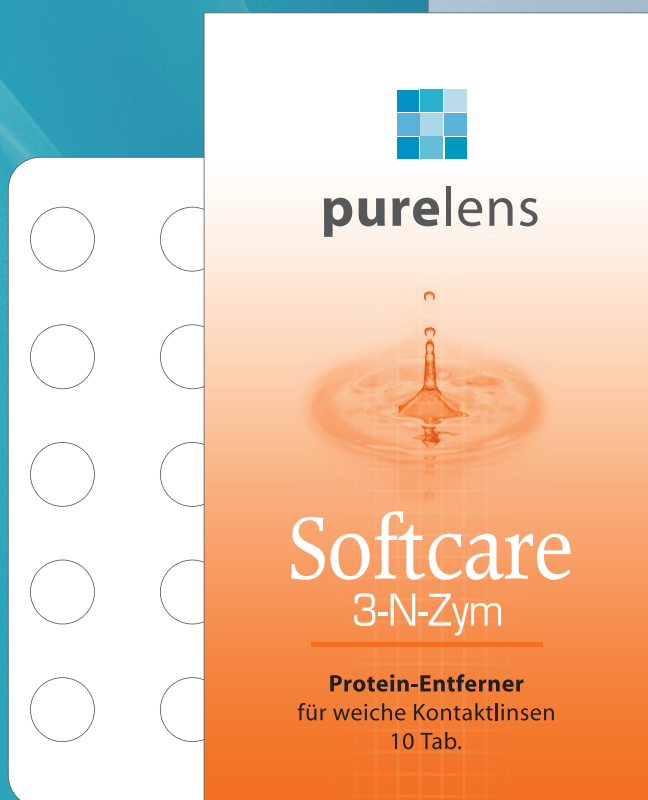



**purelens**

# Softcare N-Zym

Enzym-Reinigungstabletten für eine intensive wöchentliche Reinigung aller weichen und harten Kontaktlinsen.


10 Brausetabletten auf der Grundlage von den 3 Enzymkomponenten: Amylase, Lipase und Triptase.  
purelens N-Zym entfernt Proteine, Lipide und Muzine  
purelens N-Zym Tabletten können in Kombination mit folgenden Lösungen verwendet werden:  
purelens Softcare 1-Sept, purelens Softcare Monosept, purelens Softcare Comfort, purelens Softcare Saline

## Anwendungshinweise

Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie die Kontaktlinsen berühren.  
Legen Sie die Kontaktlinsen in den Behälter.  
Verwendung von purelens Softcare 1-Sept:  
Geben Sie zum bis zur Markierung gefüllten Behälter eine purelens Softcare N-Zym Tablette hinzu. Die Tablette mindestens 2 Stunden, höchstens aber 12 Stunden einwirken lassen. Danach den Behälter leeren und mit purelens Softcare 2-Sept Neutralisationslösung auffüllen. Darin mindestens 10 – 20 Minuten liegen lassen. Vor dem Einsetzen die Kontaktlinsen gründlich mit purelens Softcare 2-Sept Lösung oder Saline abspülen.  
Verwendung von purelens Softcare Comfort und Monosept:  
Sofort eine purelens Softcare N-Zym Tablette hinzufügen. Nach dem Ende der Neutralisationszeit (mind. 6 Stunden) die Linsen gut mit purelens Softcare Saline abspülen.  
Verwendung von purelens Softcare All in one:  
Kontaktlinsenbehälter bis zur Markierung mit purelens Softcare All in one Lösung füllen und N-Zym Tablette beifügen. Mindestens 2 Stunden, max. 12 Stunden einwirken lassen. Behälter ausschütten und neu mit All in one Lösung füllen. Gründlich schütteln. Kontaktlinsen können jetzt wieder eingesetzt werden.

## Zusammensetzung

Brausetablette auf der Basis von Pancreatine-Trypsin in Kombination mit 3 Enzymkomponenten (Amylase, Lipase und Triptase)

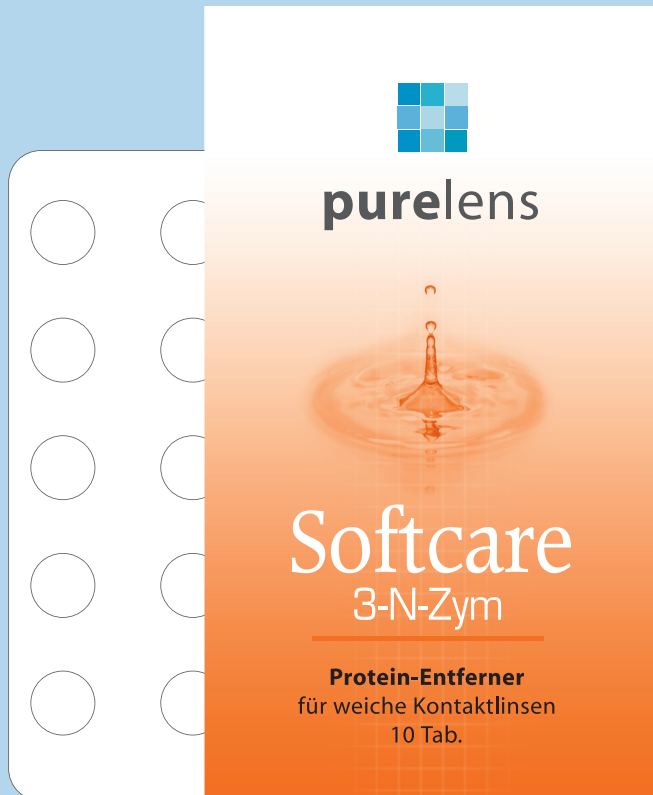

## Warnhinweise

Die Tabletten NICHT EINNEHMEN!  
Die Tabletten nicht verwenden, wenn die Blisterpackung beschädigt ist. Nach dem Haltbarkeitsdatum nicht mehr verwenden.  
Bei Augenreizungen: Den Gebrauch einstellen und Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt um Rat fragen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tabletten trocken und dunkel bei Zimmertemperatur aufbewahren.