



**purelens**

# Softcare All in one

## Komplettpflege für alle weichen Kontaktlinsen


Dank seiner einzigartigen Formel mit Provitamin B5, schützt und unterstützt purelens Softcare All in one die Augenoberfläche während des Tragens der Kontaktlinsen.

Reinigen, Entfernen von Proteinablagerungen, Desinfizieren, Aufbewahren, Benetzen, Abspülen und Augenpflege mit einer einzigen Lösung.

Vergleichbar und anwendbar wie:

Complete, Dispo, Renu, EYEYE All in One, Dynaeasy 3, Eynaeasy 7

Menge: 360 ml

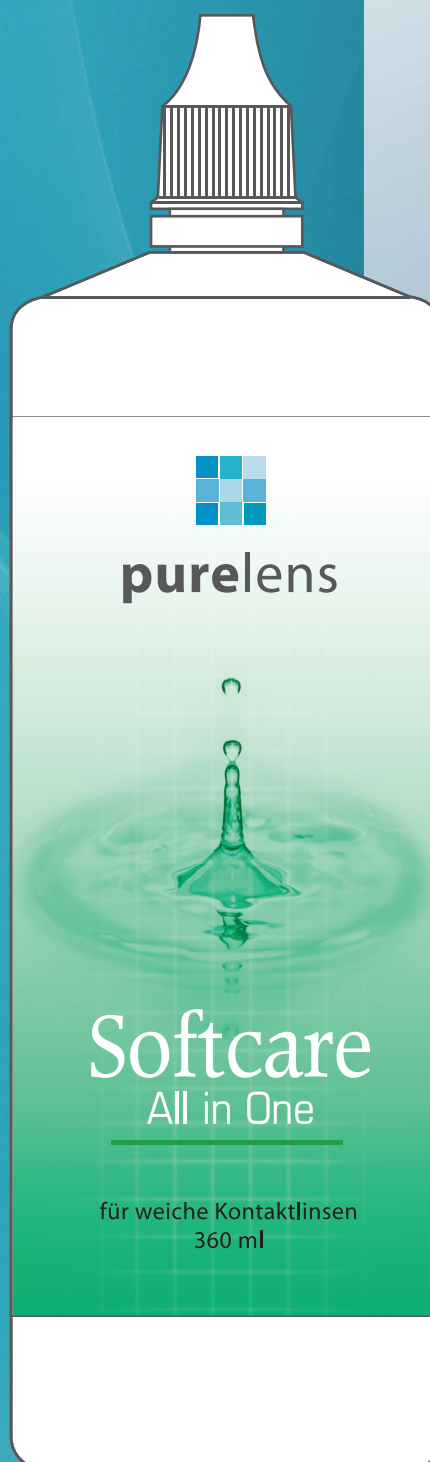



purelens

# Softcare All in one

Eye Responsive Care System für weiche Kontaktlinsen mit Provitamin B5 und HydraFlex™

Kombilösung mit pflegenden Eigenschaften für Cornea und Tränenfilm

**Für die Kontaktlinse:**

Optimal reinigende und desinfizierende Wirkung durch Polyhexanid und HydraFlex

Enzymreinigung in einem Schritt

Optimaler Tragekomfort und einfache Handhabung

**Für das Auge:**

Zur Erhaltung gesunder Funktionen des Augenepithels

Zur Erhaltung eines gesunden Tränenfilms.

## Anwendungshinweise

Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie die Kontaktlinsen aus dem Auge oder aus dem Behälter nehmen.

Spülen Sie vor der Desinfektion die Kontaktlinsen gut mit purelens Softcare All in one Lösung ab und legen Sie sie danach in den Aufbewahrungsbehälter.

Füllen Sie den Behälter mit purelens Softcare All in one Lösung auf und lassen Sie die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden im Behälter liegen.

Nach dem Desinfektionsvorgang nehmen Sie die Linsen aus dem Behälter, spülen sie mit purelens Softcare All in one Lösung ab und setzen Sie sie in Ihre Augen.

Bei starken Proteinablagerungen: Legen Sie die Kontaktlinse auf die Handfläche, geben Sie einen Tropfen purelens Softcare All in one Lösung auf die Kontaktlinse und reiben Sie die Linse vorsichtig hin und her.


Wenn Sie während des Tragens Irritationen verspüren, können Sie einen Tropfen purelens Softcare All in one ins Auge geben und einige Male blinzeln. Die Kontaktlinsen können Sie dazu auf dem Auge behalten. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.

## Zusammensetzung

Polyhexanide 0.0001%

Poloxamine 1%, HydraFlex™ 0.3%,

Dexpanthenol 1.5%

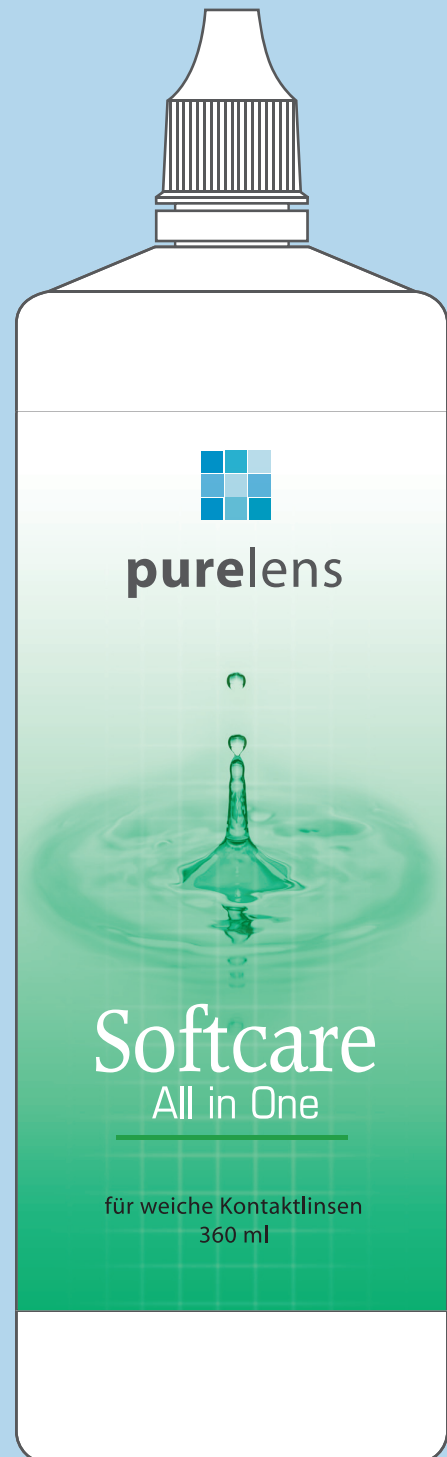

## Warnhinweise

Beim Auftreten von anhaltenden Irritationen und Augenreizungen Kontaktlinsen-Spezialist oder Augenarzt aufsuchen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Flasche nach Gebrauch verschliessen. Tropfspitze der Flasche nicht berühren. Lagern zwischen 5 und 25°; vor Licht schützen. Nach Anbruch der Flasche darf der Inhalt nicht länger als 2 Monate verwendet werden! Verfalldatum nicht überschreiten.