



**purelens**

# Softcare Comfort

**Peroxidsystem für alle weichen Kontaktlinsen mit neuen, pflegenden Eigenschaften für Cornea und Tränenfilm**

Mit biologischem rosa Farbindikator Intensive Benetzungspflege durch Hydraflex™.  
Extra Schutz für Cornea durch Betanin.

Vergleichbar und anwendbar wie:  
Oxysept Comfort, EYEEYE Comfort, Dynaeasy 5

Menge: 360 ml mit 40 Tabletten, reicht für 40 Reinigungen





purelens

# Softcare Comfort

Peroxidsystem für alle weichen Kontaktlinsen mit neuen, pflegenden Eigenschaften für Cornea und Tränenfilm

purelens Comfort übertrifft die ISO Normen für mikrobielle Reinigung und Desinfektion auf der Basis von Wasserstoffperoxid 3%. Es wirkt bei allen Augenerregenden effektiv. Die Neutralisation wird durch eine mikrobielle Katalase durchgeführt, die keine tierischen Substanzen enthält.

purelens Comfort ist frei von Konservierungsstoffen. Der leicht rosafarbene Farbstoff bietet Sicherheit, dass die Tablette der Lösung zugefügt wurde. Sichtbar ist der Farbstoff nur vorübergehend und löst sich bei längerer UV-Bestrahlung automatisch auf.

## Anwendungshinweise

Waschen Sie sich vor der Kontaktlinsenpflege sorgfältig die Hände und berühren Sie die Tropfspitze der Flasche nicht.

Nachdem Sie die Linsen in Ihre entsprechenden Körbchen gelegt und diese vorsichtig geschlossen haben, den Behälter EXAKT bis zum Strich mit der purelens Comfort-Lösung auffüllen. Geben Sie eine Comfort-Neutralisationstablette in den gefüllten Kontaktlinsenbehälter. Den Behälter gut verschließen und die Kontaktlinsen während mind. 6 Stunden, möglichst aber die ganze Nacht in der Lösung belassen.

Vor dem Herausnehmen der Kontaktlinsen den Behälter kurz schütteln, dass die Lösung auch die Innenseite des Deckels neutralisieren kann. Für eine vollständige Neutralisation von mindestens 6 Stunden muss sich die Tablette nicht ganz aufgelöst haben. Es kann immer ein kleiner Tablettenrückstand in der Lösung bleiben.

Danach können die Kontaktlinsen direkt aus der neutralisierten Lösung eingesetzt werden. Wir empfehlen, die Kontaktlinsen vor dem Einsetzen mit purelens Saline abzuspülen.

Die gebrauchte Lösung bitte sofort wegschütten. Dann den Behälter gut mit purelens Saline oder Comfort abspülen. NIE Leitungswasser verwenden.

## Zusammensetzung

Wasserstoffperoxid 3%

Tabletten:

Mikrobielle Katalase 0.1 mg, HydraFlex™, Betanin



## Warnhinweise

purelens Comfort darf nicht direkt ins Auge kommen! Nur wenn die Lösung neutralisiert ist!

Beim Auftreten von anhaltenden Irritationen und Augenreizungen Kontaktlinsen-Spezialist oder Augenarzt aufsuchen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Flasche nach Gebrauch verschließen. Tropfspitze der Flasche nicht berühren. Lagern zwischen 5 und 25°; vor Licht schützen. Nach Anbruch der Flasche darf der Inhalt nicht länger als 3 Monate verwendet werden! Verfalldatum nicht überschreiten.