



**purelens**


# Softcare Monosept

Klassisches Pflegesystem für die optimale Desinfektion aller weichen und flexiblen Kontaktlinsen.

Praktisches Einflaschensystem. Effektive Wirkung bei allen wichtigen Krankheitserregern. Frei von Konservierungsstoffen und dadurch NICHT reizend oder schädigend für das Auge.

Vergleichbar und anwendbar wie: AO-Sept, Easy Sept, EYEE Mono Sept, Dynaeasy 4

Menge: 360 ml, reicht für 36 Reinigungen

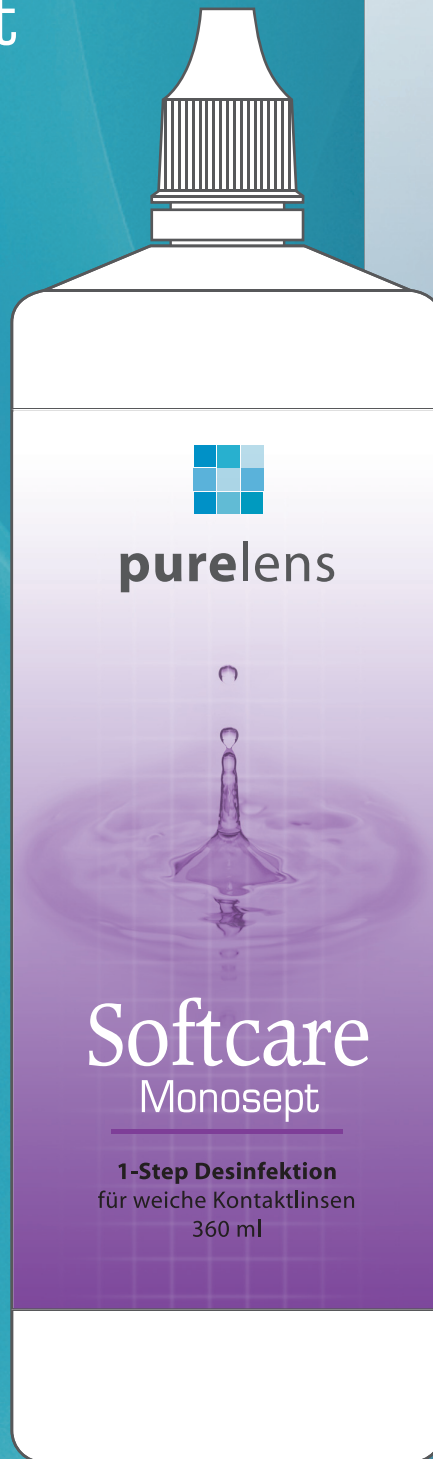



purelens

# Softcare Monosept

Klassisches Pflegesystem für die optimale Desinfektion aller weichen und flexiblen Kontaktlinsen.

Durch das Platincoating des MonoSept Katalysators wird das Wasserstoffperoxid neutralisiert und in eine isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierung umgewandelt.

Die Desinfektion und Neutralisation erfolgt zugleich und ist nach 6 Stunden abgeschlossen.

Frei von Konservierungsstoffen.

## Anwendungshinweise

Waschen Sie sich vor der Kontaktlinsenpflege sorgfältig die Hände und berühren Sie die Tropfspitze der Flasche nicht.

Nachdem Sie die Linsen in Ihre entsprechenden Körbchen gelegt und diese vorsichtig geschlossen haben, den Behälter EXAKT bis zum Strich mit der MonoSept-Lösung auffüllen. Den Behälter gut verschliessen und die Kontaktlinsen während mind. 6 Stunden, möglichst aber die ganze Nacht in der Lösung belassen.


Danach können die Kontaktlinsen direkt aus der neutralisierten Lösung eingesetzt werden. Wir empfehlen, die Kontaktlinsen vor dem Einsetzen mit purelens Saline abzuspülen.

Die gebrauchte Lösung bitte sofort wegschütten. Dann den Behälter gut mit purelens Saline oder Monoseptlösung abspülen. NIE Leitungswasser verwenden. Den Platinstern auch abspülen, um Rückstände zu entfernen, die allenfalls die Neutralisation der MonoSept-Lösung beeinflussen könnte. Die Linsenhalterung und den Stern an der Luft trocknen lassen.

Wechseln sie beim Anbruch einer neuen Flasche immer den Behälter mit dem Platinstern aus.

## Zusammensetzung

Wasserstoffperoxid 3%

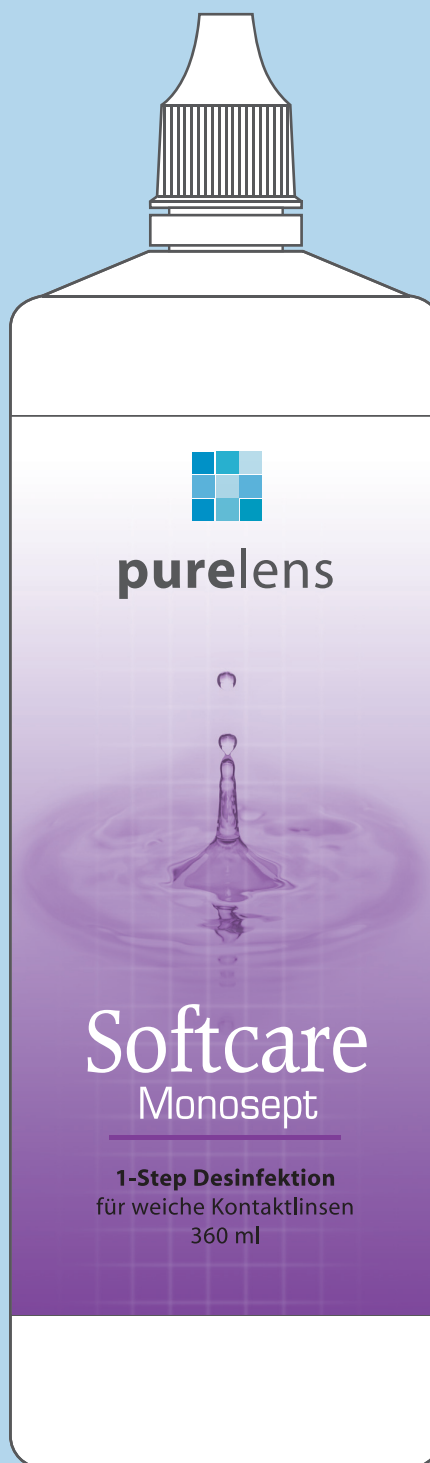

## Warnhinweise

purelens MonoSept darf nicht direkt ins Auge kommen! Nur wenn die Lösung neutralisiert ist!

Beim Auftreten von anhaltenden Irritationen und Augenreizungen Kontaktlinsen-Spezialist oder Augenarzt aufsuchen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Flasche nach Gebrauch verschliessen. Tropfspitze der Flasche nicht berühren. Lagern zwischen 5 und 25°; vor Licht schützen. Nach Anbruch der Flasche darf der Inhalt nicht länger als 3 Monate verwendet werden! Verfalldatum nicht überschreiten.